



# SERVICIO MONTADO DE TECHO COLUMNA MANUAL RETRACTABLE

## ESPECIFICACIONES:

La columna de techo retractable debe ser Amico serie Alert 1.

La columna retractable de techo debe ser del tipo que requiere operación manual. La columna debe consistir de una sección superior para lograr un montaje rígido al nivel del cielo raso y una sección inferior telescópica capaz de ser extendida a un máximo de 18".

La sección retractable de la columna es activada mediante un mecanismo de resorte espiralado y puede ser bajada o subida a cualquier posición. La rotación de la manija permitirá que la columna permanezca inmóvil o movable. Con la ayuda de un sistema de rieles internos, el movimiento de la porción del telescopio se deslizará libremente hacia abajo y hacia arriba.

Los recubrimientos de la sección superior e inferior están hechos de acero inoxidable de calibre 16 con una terminación de satén #4 y están completos con:

- Panel de acceso movable.
- Collar de techo de acero inoxidable.
- Una placa de montaje de acero de un calibre fuerte, equipado con accesorios del tipo recubierto con soldadura de cobre para todas las conexiones de gas médico por encima del nivel del cielo raso.

Todos los servicios de gas médico son provistos a la cara de la sección inferior mediante tubos flexibles y cables. Todas las conexiones fileteadas cumplen con las recomendaciones NFPA, CGA y DISS previniendo intercambiar las conexiones. Todos los servicios están pre-montados y probados de fábrica. Las dimensiones estándares son de 13-9/16" X 13-9/16" para la sección superior y de 12" X 12" para la sección inferior. Los dispositivos eléctricos no se encuentran pre-conectados.


Note: La altura del cielo raso debe ser determinada por el cliente.

### La Columna Retractable acomoda:

- Hasta 10 tomas de servicios de gas en cualquier secuencia deseada.
- Las tomas eléctricas pueden ser agregadas a cualquiera de los cuatro lados de la columna.
- Cualquier combinación de enchufes de puesta a tierra, tomas de computadoras, dispositivos de comunicación, ganchos de soporte de Suero Intravenoso y portaobjetos pueden también ser montados en los paneles laterales.

Los productos Amico cumplen con NFPA-99.

**Número de Modelo de La Columna de Techo:**  
**C-COL-MAN**

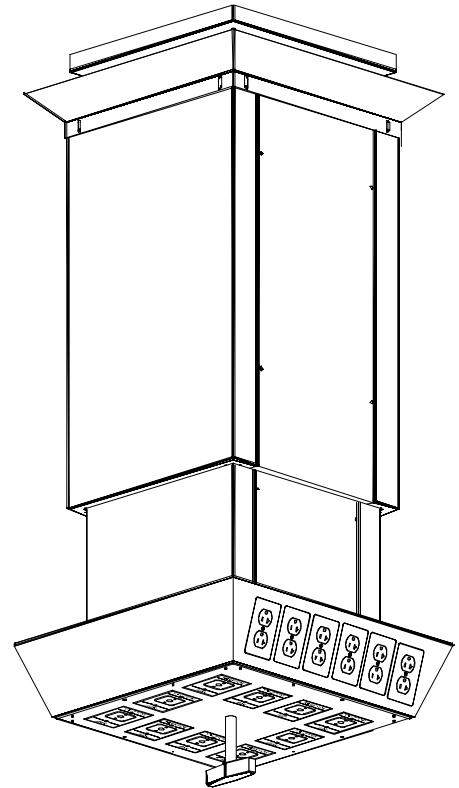

## CARACTERISTICAS:

- La columna de techo retractable aumenta la facilidad de operación en áreas sobrecargadas cuando se provee gas médico y otros servicios eléctricos en salas quirúrgicas.
- Cuando no está en uso, puede ser fácilmente guardado tirando de la sección telescópica, y de tal manera, evitando todo contacto accidental con el personal médico.
- Al ser necesitada, la cara de la columna puede ser bajada para facilitar la conexión de los servicios.
- Esta unidad compacta suspendida en el cielo raso puede ser equipada con tomas de gas médico, dispositivos eléctricos, ganchos de soporte de Suero Intravenoso y tomas de computadoras o comunicación.

## PROYECTO:


---

---


---

# INFORMACION DE INSTALACION

*Es importante que la columna esté nivelada y recta en todo sentido.*

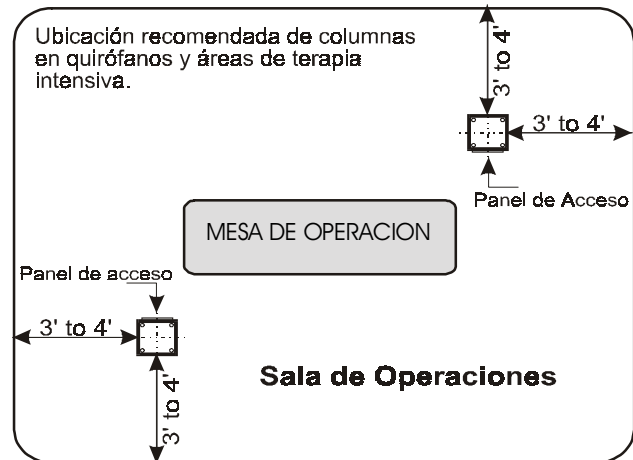


## ESPACIO LIBRE DE PISO & PATRON DE DESLIZAMIENTO

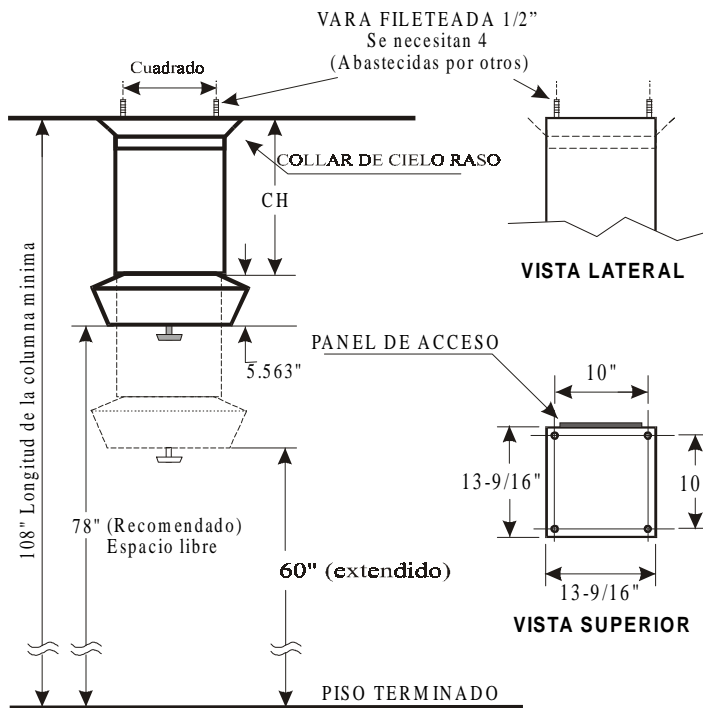

**A** Series  
**ALERT-1**

inch  
[mm]

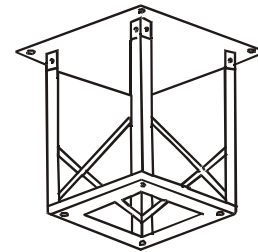

ESTRUCTURA DE SOSTEN  
(Abastecida por otros)

CH (Altura mínima del cielo raso, debe ser determinada por el cliente).

## DISTRIBUIDO POR: